

SPLASH SOCKEL-AUSTAUSCH ANLEITUNG

Weitere Informationen über die Vorgehensweise beim Sockelaustausch des Splash!™ und ein Video zu den Arbeitsschritten beim Austausch finden Sie auf www.splashpalliftinfoeu.com.

BENÖTIGTES WERKZEUG	INHALT DES AUSTAUSCHPAKETS FÜR DEN SPLASH SOCKEL
<p>3/4 Zoll (1,9 cm) Steckschraubenschlüssel</p> <p>9/16 Zoll (1,4 cm) Schraubenschlüssel</p> <p>Teppichmesser</p>	<p>Falls Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an S.R. Smith.</p> <p>Werkzeugpaket</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei — 1/2 Zoll (1,3 cm) Nylock Muttern Edelstahl • Zwei — 1/2 Zoll (1,3 cm) 316 Beilagscheiben Edelstahl • Eine — 3/8 Zoll (1 cm) 1.25 Sechskantschraube • Eine — 3/8 Zoll x 7/8 Zoll (1 cm x 2,2 cm) Unterlegscheibe Edelstahl <p>• Eine — 3/8 Zoll (1 cm) Dichtungsscheibe Nylon</p> <p>• Eine — 3/8 Zoll (1 cm) Sicherungsscheibe, Federring Edelstahl</p> <p>Sockelbaugruppe</p> <p>Klebeband</p> <p>Adressaufkleber für den Rückversand</p> <p>Registrierungsformular</p>
<p>HEBEN SIE ALLE VERPACKUNGSMATERIALIEN SORGFÄLTIG AUF; SIE BRAUCHEN SIE ZUM VERPACKEN UND KOSTENLOSEN RÜCKVERSAND DES VORHANDENEN SOCKELS.</p>	

<p>1</p> <p>Die Verpackung vorsichtig öffnen.</p> <p>Den für den Rückversand an S.R. Smith benötigten Adressaufkleber zur Seite legen.</p> <p>Den Karton auf die Seite neigen und den Ersatzsockel vorsichtig auf eine nicht kratzende Unterlage gleiten lassen.</p> 	<p>2</p> <p>Mit einem 3/4 Zoll (1,9 cm) Steckschraubenschlüssel die Befestigungsmuttern am Griff lösen und den Griff, den hölzernen Abstandshalter und das Schaummaterial entfernen.</p> <p>Alles zur Seite legen.</p> 	<p>3</p> <p>Die Batterie aus dem Liftantrieb („LiftOperator“) entfernen.</p> <p>Das Motorkabel, Antriebskabel und die Handsteuerung vom Liftantrieb („LiftOperator“) abstecken.</p> 	<p>4</p> <p>Die Flügelmutter und den Bolzen am Rücken des Liftsitzes lösen und die Sitzbaugruppe entfernen.</p> 
---	---	---	--

5
Zur Ausführung dieses Arbeitsschritts sind möglicherweise zwei Personen erforderlich.

Die runde Abdeckkappe abnehmen, so dass der Sockel frei liegt.



6
Zur Ausführung dieses Arbeitsschritts sind möglicherweise zwei Personen erforderlich. Lassen Sie eine Person den Liftmasten festhalten. Mit einem 3/4 Zoll (1,9 cm) Teleskopschraubenschlüssel die beiden Muttern lösen, die den Masten mit dem Sockel verbinden.



7
Zur Ausführung dieses Arbeitsschritts sind möglicherweise zwei Personen erforderlich. Den Masten aus dem Sockel nehmen. Den Masten vorsichtig auf einer nicht kratzenden Unterlage ablegen.



8
Die Schaummatte und den hölzernen Abstandshalter am Sockel befestigen und den Bolzen festziehen.



9
Falls der Lift eine Halteöse besitzt, die entsprechende Mutter mit einem 9/16 Zoll (1,3 cm) Schraubenschlüssel lösen.



10
Den Sockel vorsichtig an den Griffen aus dem Sockelanker lösen.



11
Den Schaumstoffwürfel auf den Sockelstamm stecken und die Baugruppe in den Versandkarton gleiten lassen.



12
Den neuen Sockel auf dem Sockelanker befestigen. Falls im Arbeitsschritt #9 der Bolzen an der Halteöse gelöst wurde, den Haltebolzen wieder befestigen.



13
Zur Ausführung dieses Arbeitsschritts sind möglicherweise zwei Personen erforderlich. Die Mastbaugruppe wieder am gelieferten Ersatzsockel befestigen.

Mit einem 3/4 Zoll (1,9 cm) Schraubenschlüssel die Muttern vollständig festziehen.



14
Die Batterie wieder einsetzen und das Motorkabel, das Antriebskabel und die Handsteuerung wieder anschließen. Mit dem Lift einen vollständigen Funktionstest durchführen (bitte richten Sie sich dabei nach den detaillierten Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Beckenlifts).



15
Das Registrierungsformular für den Lift ausfüllen und zusammen mit dem alten Sockel in den Versandkarton legen. Den Versandkarton mit dem mitgelieferten Klebeband dicht verschließen.

SPLASH LIFT OWNER PRODUCT REGISTRATION
Please complete and return to us with the Splash base you are returning to SRS.

SPLASH POOL LIFT REGISTRATION

Contact Email: _____
 Contact Name: _____
 Title: _____
 Facility Name: _____
 Street Address: _____
 City: _____ State: _____ Zip: _____
 Cell/Work Number: _____

Which base is the new Splash! base that has been installed?
 Date Installed: _____

FAQ

Where is the product serial number located?
 The serial number will only be visible if the lift is located on the lower portion of the mast.

When can I get more information?
 Please visit www.srs-smith.com to find information about the assembly, replacement procedure and other information regarding the replacement or contact our customer service team at (503) 266-0249, email road@mawyc.be

16
Eine detaillierte Versandanleitung finden Sie auf dem orangefarbenen Blatt mit der Aufschrift „RÜCKSEND-ANLEITUNG.“



Weitere Informationen

Website:
www.splashpalliftinfoeu.com
Kundenservice:
+1 (503) 266 0249

Rückversand:
KDL International
Telefon +32 2 354 7584
E-Mail: road@mawyc.be

Garantie

Für den Ersatzsockel des Splash! gewähren wir ab Erhalt zwei Jahre Garantie.

Darüber hinaus erweitern wir die ursprüngliche Garantiezeit für tragende Teile des Lifts von drei auf fünf Jahre ab Herstellungsdatum.

Weitere Informationen finden Sie hier:

<http://srs-smith.com/en-us/customer-service/warranty-information/>