

REEMPLACEMENT DE LA BASE SPLASH

INSTRUCTIONS

Pour plus d'informations sur le processus de remplacement de la base Splash!^{MD} et pour visionner la vidéo s'y rapportant, consultez le site www.splashpalliftinfoeu.com.

OUTILS NÉCESSAIRES	PIÈCES CONTENUES DANS LE COLIS DE REMPLACEMENT DE LA BASE SPLASH	
<p>Clé à douille universelle 19 mm</p> <p>Clé mixte 14 mm</p> <p>Cutter</p>	<p>Contactez S.R. Smith s'il manque des pièces.</p> <p>Quincaillerie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux—écrous inox Nylock, 12mm • Deux—rondelles inox 316, 12mm • Une—vis à 6 pans, 9mm, 1.25 pas en mm • Une—rondelle plate inox, 9mmx 22mm • Une—rondelle de protection nylon, 9mm • Une—rondelle de blocage inox Split, 9mm 	<p>Base</p> <p>Ruban adhésif</p> <p>Étiquette d'expédition pour le retour</p> <p>Formulaire d'enregistrement du produit</p>
<p>ASSUREZ-VOUS DE CONSERVER TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ; VOUS LES UTILISEREZ POUR EMBALLER LA BASE DÉFECTUEUSE QUE VOUS ENVERREZ SANS FRAIS À S.R. SMITH.</p>		

<p>1</p> <p>Ouvrez le carton avec précaution.</p> <p>Gardez l'étiquette d'expédition. Vous en aurez besoin pour renvoyer la base à S.R. Smith.</p> <p>Posez le carton sur le côté, sur une surface qui n'égratigne pas. Faites glisser doucement la base hors du carton.</p> 	<p>2</p> <p>À l'aide d'une clé à douille universelle 19 mm. Retirez la barre, la cale en bois et la feuille protectrice en polystyrène. Mettez le tout de côté.</p> 	<p>3</p> <p>Retirez la batterie du LiftOperator.</p> <p>Débranchez tous les cordons du LiftOperator.</p> 	<p>4</p> <p>Avant de retirer le siège, dévissez l'écrou à oreilles et le boulon placés à l'arrière.</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
Cette étape peut exiger l'intervention de deux personnes.

Enlevez le cache qui recouvre le pied du bras.



6
Cette étape peut exiger l'intervention de deux personnes.

Une personne doit tenir solidement le bras. À l'aide d'une clé à douille universelle 19 mm, dévissez les deux écrous qui retiennent le bras à la base.



7
Cette étape peut exiger l'intervention de deux personnes.

Séparez le bras de la base. Posez délicatement le bras sur une surface qui n'égratigne pas.



8
Placez la feuille protectrice puis la cale en bois sur la base. Fixez le tout en vissant le boulon.



9
Si un écrou maintient la base fixée au sol, dévissez-le à l'aide d'une clé mixte 14 mm.



10
Tirez délicatement la base hors du point d'ancrage au sol.



11 po (27,94 cm)
Insérez le pied de la base dans le bloc de protection en polystyrène et faites glisser le tout dans le carton d'expédition.



12
Placez la nouvelle base dans le point d'ancrage au sol. Si un écrou a été dévisé à l'étape 9, remplacez-le.



13
Cette étape peut exiger l'intervention de deux personnes.

Fixez de nouveau le bras à l'aide des pièces fournies.

Utilisez la clé mixte 14mm pour bien serrer les boulons.



14
Remplacez la batterie et rebranchez tous les cordons.

Effectuez un test avec la commande (consultez le mode d'emploi pour connaître tous les détails)



15
Remplissez le formulaire d'enregistrement du produit et déposez-le sur l'ancienne base emballée dans le carton.

Refermez le carton d'emballage à l'aide du ruban adhésif fourni.

SPLASH! LIFT OWNER PRODUCT REGISTRATION
Please complete the form below and insert it in the box with the Splash! base you are returning to SR Smith.

SPLASH! POOL LIFT REGISTRATION

Customer Name: _____
 Contact Name: _____
 Title: _____
 Facility Name: _____
 Street Address: _____
 City: _____ State: _____ Zip: _____
 LIFT Serial Number: _____

Check box to confirm the new Splash! base has been installed.
 Date Installed: _____

NOTE:
Where is the product serial number located?
The model number and serial number of the lift is located on the front portion of the base.

When can I get more information?
Please visit www.splashliftpool.com for information about the assembly, replacement procedure and any other information from the replacement center or contact your customer service team at (866) 267-0249, email customerservice@srsmith.com

16
Pour plus d'informations concernant la livraison, consultez le papier orange intitulé « INSTRUCTIONS DE RETOUR. »



RESSOURCES

Site Web : www.splashliftpool.com

Service clientèle :
+1 503 266 0249

Destinataire :
KDL International
Tél. : +32 2 354 75 84
Courriel : road@mawyc.be

INFORMATION SUR LA GARANTIE

La base de remplacement Splash! est couverte par une garantie de deux ans dès réception du produit.

Nous prolongeons aussi la garantie d'origine des composants de structure de trois à cinq ans à partir de la date de fabrication.

Pour plus d'informations, consultez la page : <http://srsmith.com/fr-fr/customer-service/information-sur-la-garantie/>