

# SOSTITUZIONE DELLA BASE SPLASH

## ISTRUZIONI

Per maggiori informazioni relative al procedimento di sostituzione della base di Splash !™ e per vedere il video di dimostrazione, visitate [www.splashliftinfoeu.com](http://www.splashliftinfoeu.com).

ATTREZZI NECESSARI	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DELLA BASE SOSTITUTIVA DI SPLASH
1.9 cm chiave a tubo 1.4 cm chiave inglese Taglia scatola	Contattare S.R. Smith se mancano dei pezzi <b>Pacchetto di attrezzi</b> Due Dadi Nylock SS 1/2" Due rondelle 1/2" 316 SS Una testa esagonale 3/8 1.25 Una rondella piatta "x 7/8" SS Una rondella in Nylon protettiva 3/8 Una rondella 3/8, Split S/S <b>Gruppo Base</b> Nastro adesivo per pacchi Etichetta per la restituzione Cedola di Registrazione del Prodotto
<b>ACCERTATI DI CONSERVARE TUTTI I MATERIALI DELL'IMBALLAGGIO LI USERETE ANCORA PER IMBALLARE LA BASE ESISTENTE E SPEDIRLA A S. R. SMITH SENZA ALCUNA SPESA</b>	

<p><b>1</b></p> <p>Aprire il collo facendo attenzione Conserva l'etichetta di spedizione che sarà necessaria per restituire la base a S.R. Smith. Ruotare la scatola su un lato e far scivolare gentilmente la base su una superficie anti graffio.</p> 	<p><b>2</b></p> <p>Usando una chiave a tubo 3/4" rimuovere i dadi che mantengono la maniglia in posizione, rimuovere la maniglia, il distanziale in legno e la spugna Mettere da parte</p> 	<p><b>3</b></p> <p>Rimuovere la batteria dal sollevatore Disconnettere la corda del motore, la corda dell'attuatore e il controllo manuale dal sollevatore.</p> 	<p><b>4</b></p> <p>Rimuovere il dado e il bullone dal retro del sedile del sollevatore e rimuovere il montaggio del sedile</p> 
---	--	--	--

**5**  
Questo passaggio potrebbe richiedere due persone .

Rimuovere il tappo rotondo per esporre la base .



**6**  
Questo passaggio potrebbe richiedere due persone

Avere una persona che tenga l'albero fermo Utilizzando una chiave a tubo 1.9 cm, rimuovere i due dadi che connettono l'albero alla base



**7**  
Questo passaggio potrebbe richiedere due persone

Separare l'albero dalla base Posare gentilmente l'albero su una superficie anti graffio



**8**  
Attaccare il foglio di spugna e il distanziale di legno sulla base e fissare il bullone



**9**  
Se il sollevatore dispone di una linguetta di blocco, rimuovere il dado con una chiave inglese 9/16"



**10**  
Usare le maniglie per tirare gentilmente la base fuori dall'ancora



**11**  
Posizionare il mattone di spugna sul gambo della base e fare scivolare l'assemblaggio sul cartone di spedizione



**12**  
Installare la nuova base sull'ancora Se avete rimosso un bullone nel passaggio #9, riattaccare i bulloni di ancoraggio della serratura



**13**  
Questo passaggio potrebbe richiedere due persone

Riattaccare la base dell'albero con i nuovi attrezzi che sono stati forniti Utilizzando una chiave inglese 3/4", fissare i bulloni completamente



**14**  
Riattaccare la batteria e connettere la corda del motore, la corda dell'attuatore e il controllo manuale Procedere con un test funzionale completo del sollevatore (fare riferimento al manual d'istruzioni per maggiori dettagli)



**15**  
Completate il formulario di registrazione, e inseritelo nell'imballaggio con la base vecchia Richiudere la scatola con il nastro adesivo fornito

**SPLASH LIFT OWNER PRODUCT REGISTRATION**  
Please complete this form before and insert it in the box with the Splash Lift you are returning to S & Smith.

**SPLASH POOL LIFT REGISTRATION**

Contact Name: \_\_\_\_\_  
 Contact Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Facility Name: \_\_\_\_\_  
 Street Address: \_\_\_\_\_  
 City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_  
 Cell/Work Number: \_\_\_\_\_

Which box to confirm the new Splash Lift has been installed.  
 Date Installed: \_\_\_\_\_

**FAQ**

Where is the product serial number located?  
 The serial number will only be visible if the lift is located on the lower portion of the mast.

Where can I get more information?  
 Please visit [www.splashlift.com](http://www.splashlift.com) for full information about the assembly, replacement procedure and other important information. The information is best or contact our customer service team at (800) 467-1686, email [sales@splashlift.com](mailto:sales@splashlift.com)

**16**  
Per informazioni dettagliate sulla spedizione, fare riferimento ai documenti arancioni segnati ' ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE DI RESO '



## RISORSE

Sito Web  
[www.splashliftinfoeu.com](http://www.splashliftinfoeu.com)  
 Servizio Assistenza Clienti:  
 +1 (503) 266 0249

Trasporto di ritorno:  
 KDL International  
 Telefono: +32 2 354 7584  
 E-mail: [road@mawyc.be](mailto:road@mawyc.be)

## INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

La base sostitutiva Splash ha una garanzia di due anni partendo dalla data di consegna

Estendiamo la garanzia originaria per le parti strutturali del sollevatore da tre anni a cinque anni dalla data di fabbricazione

Per maggiori informazioni, visitare: <http://srsmith.com/en-us/customer-service/warranty-information/>